



BURMEIER

Gebrauchsanweisung Aufstehhilfe

Type 175402

Abhängig vom Pflegebettenmodell kann die Aufstehhilfe als Zubehör eingesetzt werden.

Funktionssicherheit und Gewährleistung bleiben erhalten, wenn original BURMEIER-Ersatzteile verwendet werden! Bei Ersatzteilbestellungen und Fragen wenden Sie sich bitte an:

Burmeier GmbH & Co. KG

(Ein Unternehmen der Stiegemeyer-Gruppe)

Pivitsheider Straße 270 • D - 32791 Lage/Lippe

Tel. : 0 52 32/98 41- 0 • Fax: 0 52 32/98 41- 41

Email: service-zentrum@burmeier.de

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch, um Schäden durch Fehlbedienung zu vermeiden.

1. Produktbeschreibung

Die Aufstehhilfe ist ein Zubehör und dient der Kompensation bei Verletzungen oder Behinderungen.

Die Aufstehhilfe unterstützt den Patienten beim Ein- und Ausstieg aus dem Pflegebett.

Die Befestigung und Sicherung der Aufstehhilfe erfolgt über zwei Sterngriffschrauben am Längsprofil des Pflegebettes

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Aufstehhilfe dient lediglich der Mobilisierung des Patienten. Sie ist kein Ersatz für Seitengitter.


Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Pflegebettes!

3. Einsatzbereich


Die Aufstehhilfe wird mittels zweier Klauen am Längsprofil des Pflegebettes befestigt und mit zwei Befestigungsschrauben gesichert. Durch die flache Bauweise müssen die Seitengitter nicht demontiert werden und können auch weiter betrieben werden.

4. Montage

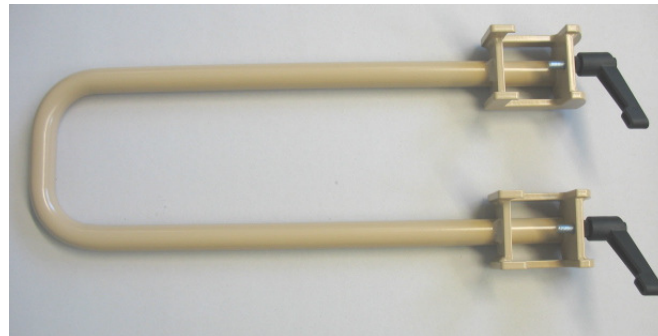

Schrauben Sie die Befestigungsschrauben fast ganz heraus und setzen die Aufstehhilfe am Längsprofil an.

Schieben Sie die Aufstehhilfe über das Längsprofil bis die Klaue das Längsprofil umschließt.

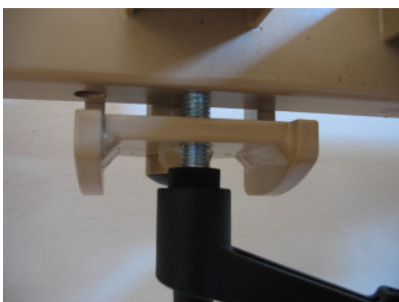

Sichern Sie die Aufstehhilfe durch Anziehen der Befestigungsschrauben.



richtig



falsch

Drehen Sie die Griffe der Befestigungsschrauben so, dass sie unter die Liegefläche zeigen.



Prüfen Sie die sichere Positionierung und den festen Sitz der Aufstehhilfe.

Sicherheitshinweise



Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise!

- Verwenden Sie nur unbeschädigte Aufstehhilfen.
- Prüfen Sie vor jedem Einsatz, dass die Aufstehhilfe mit den Befestigungsschrauben ausreichend am Längsprofil der Liegefläche gesichert ist.
- Die Aufstehhilfe darf nur so an dem Längsprofil der Liegefläche positioniert werden, dass keine Einklemmgefahr für den Patienten beim Verstellen der Liegeflächenelemente entsteht.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise zu Seitengittern in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen der Betten.
- Die Aufstehhilfe stellt keinen Ersatz für Seitengitter dar.

5. Reinigung und Desinfektion

Zur Reinigung und Pflege der Holzoberflächen können alle handelsüblichen Möbelreinigungsmittel problemlos verwendet werden. Zur Reinigung und Pflege der lackierten Metallteile ist ein feuchtes Tuch unter Verwendung handelsüblicher, milder Haushaltsreiniger geeignet.

6. Wartung

Die Aufstehhilfe ist wartungsfrei.

- Wenden Sie sich für Ersatzteilbestellungen, Kundendienstanforderungen und bei weiteren Fragen an:
 - **Burmeier GmbH & Co. KG**
 - (Ein Unternehmen der Stieglmeyer-Gruppe)
 - **Pivitsheider Straße 270 • D - 32791 Lage/Lippe**
 - **Tel. : 0 52 32/98 41- 0 • Fax: 0 52 32/98 41- 41**
 - **Email: service-zentrum@burmeier.de**

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Herausgebers!

Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen vorbehalten!

GA_Aufstehhilfe_D_25 01 2012