



Montageanleitung

Pflegebetten-Serie Inovia

Verschiebbare Seitensicherung

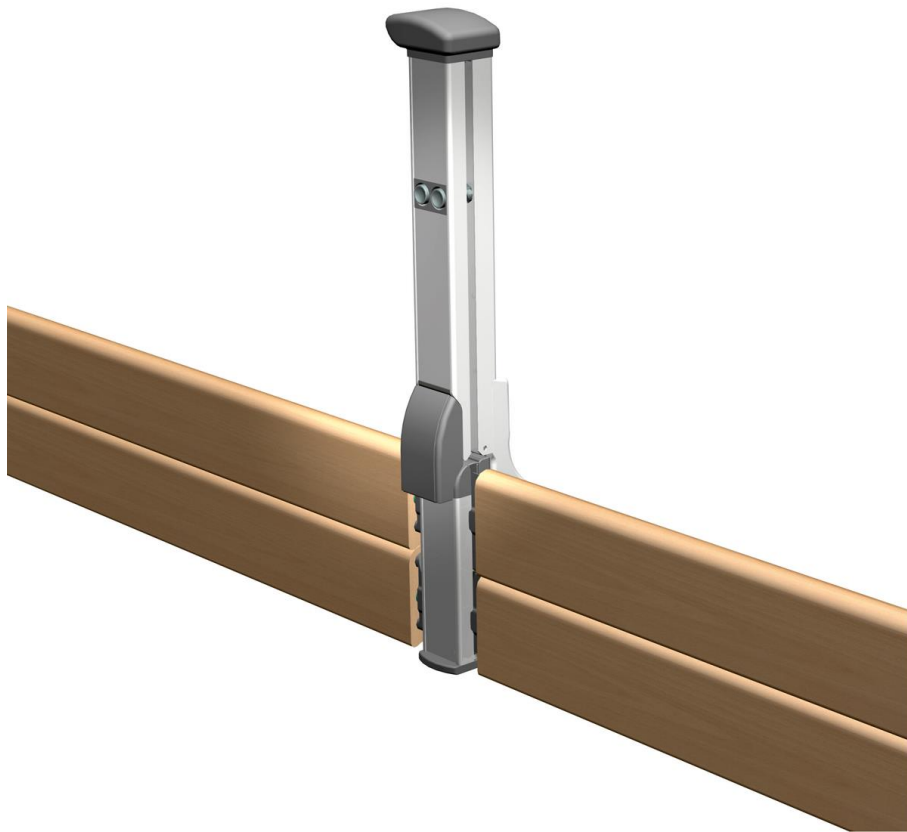

Verschiebbare Seitensicherung – Bauelemente

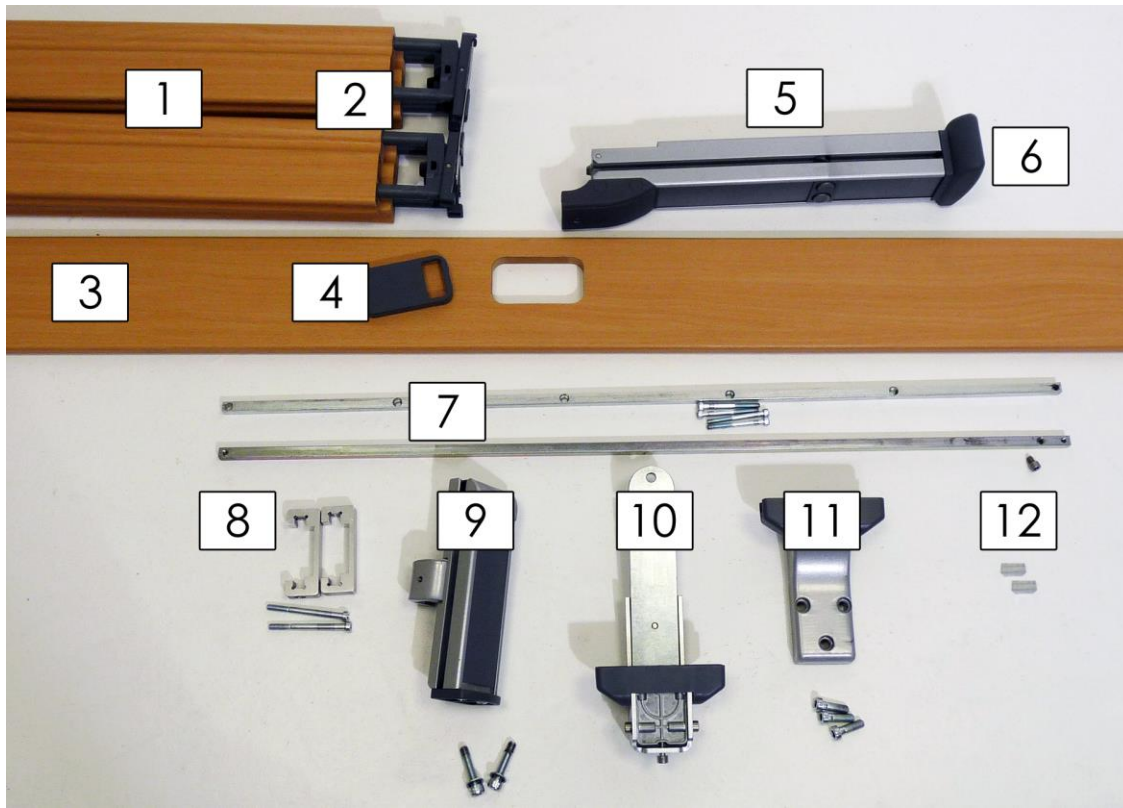

- 1 Seitensicherungsholme
- 2 Seitensicherungsführung
- 3 Seitenblende
- 4 Blende
- 5 Mittelstütze
- 6s Knauf
- 7 Schiene oben (1x M6x8)
- 7 Schiene unten (4x M5x55)
- 8 Haltespannen (2x M6x75)
- 9 Parkelement (2x M8x35, 2x Unterlegscheiben)
- 10 Schlitten – Unterteil
- 11 Schlitten – Oberteil (3x M8x25)
- 12 Distanzstücke



Hinweis

Die in dieser Montageanleitung in eckigen Klammern [] angegebenen **fettgedruckten** Ziffern beziehen sich auf die Elemente, die in dieser Abbildung dargestellt sind.

Montage

Diese Anleitung beschreibt die Montage der verschiebbaren Seitensicherung für das Pflegebett Inovia II / Inovia II 100. Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, um Schäden durch fehlerhafte Handhabung zu vermeiden.

Diese Anleitung ist ausschließlich für Fachpersonal vorgesehen und nicht für private Endverbraucher.



Hinweis

Um die Montage schneller und einfacher durchführen zu können empfehlen wir Ihnen folgende Vorbereitungen:

- Verwenden Sie einen elektrischen Akku-Schrauber.
- Fahren Sie das Bett in die höchste Position.
- Stellen Sie die Liegefläche an, um besser an die Elemente zu gelangen.

Die vorhandene Seitensicherung entfernen

1. Lösen Sie die Schrauben auf der Unterseite des Kopf- und Fußhauptes – 4 x 2 Kreuzschlitzschrauben.
2. Stellen Sie die Seitensicherung diagonal an.
3. Nun heben Sie eines der gelösten Häupter leicht an und entnehmen die Seitensicherungsholme.
Hinweis: Nehmen Sie für diesen Schritt ggf. eine zweite Person zur Hilfe.
4. Die Seitensicherungsführungen lassen Sie im Haupt stecken.





5. Um die Seitensicherungsführungen korrekt auszurichten, müssen sie am Kopf- und Fußhaupt mit zusätzlichen Distanzstücken versehen werden.
6. Setzen Sie die 2 Distanzstücke **[12]** jeweils unter die unteren Seitensicherungsführungen auf den unteren Anschlag.
7. Nun setzen Sie das Haupt wieder ein und montieren Sie die 4 x 2 Schrauben wieder.




Die Seitenblende austauschen

1. Lösen Sie die vier Schrauben auf der Innenseite des Längsprofils. Halten Sie die Blende fest, damit sie nicht herunterfällt.
2. Entfernen Sie die Schrauben und entnehmen Sie die Seitenblende.
3. Setzen Sie die neue Seitenblende **[3]** an das Bett. In der Aussparung muss die schmale Seite nach oben zeigen.
4. Setzen Sie die vier Schrauben ein und ziehen Sie diese fest.
5. Nun drücken Sie die Blende **[4]** in die entsprechende Aussparung. Die Öffnung muss zur Fußseite zeigen.

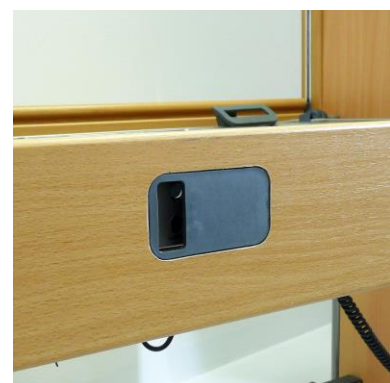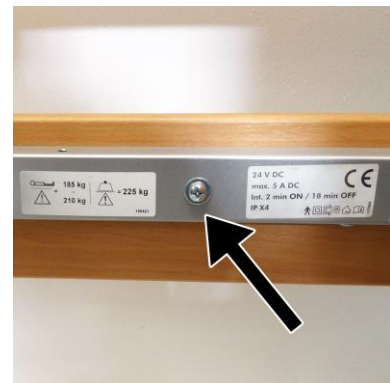

Die Schienen für den Mittelpfosten montieren


1. Setzen Sie das Parkelement **[9]** mit dem Aufnahmewinkel in die Aussparung.

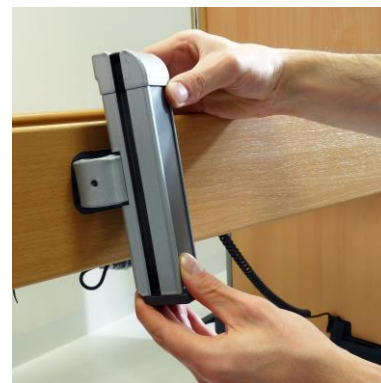


Hinweis

Das Parkelement ist für die Montage auf der rechten Seite vormontiert. Soll das Parkelement auf der linken Seite montiert werden, muss es umgebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf Seite 11.


2. Befestigen Sie das Parkelement **[9]** mit den zwei Zylinderschrauben (M8x35) und den zugehörigen Unterlegscheiben. Ziehen Sie diese vorerst nur handfest an.

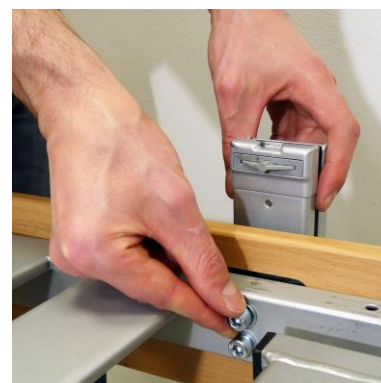


3. Nun montieren Sie die Anschlagsschraube (M6x8) auf der oberen Schiene **[7]** und ziehen die Schraube fest. Achten Sie darauf, dass die Gewindegrundlöcher nach unten zeigen.

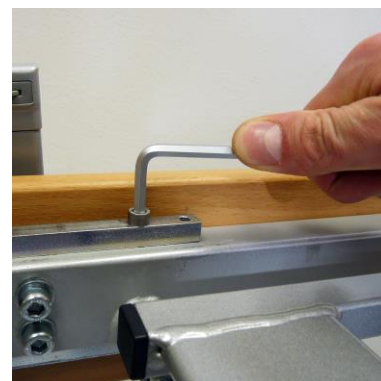

4. Legen Sie die Schiene auf das Längsprofil des Rahmens. Achten Sie darauf, dass die Anschlagsschraube zur Bettmitte zeigt und dass sich die Gewindebohrungen mit den Durchgangsbohrungen des Längsprofils überdecken.

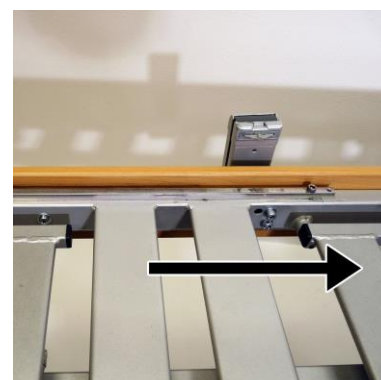

5. Die untere Schiene **[7]** muss so angelegt werden, dass die Senkungen für die Schraubenköpfe nach unten zeigen. Die Ausrichtung spielt dabei keine Rolle.

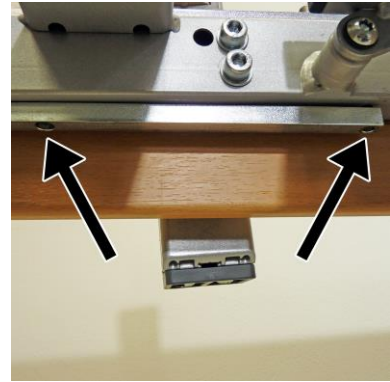

6. Nun schieben Sie die zwei Haltespangen **[8]** rechts und links auf die Schiene, sodass diese am Längsprofil fixiert sind.


Achten Sie darauf, dass sich die Durchgangsbohrungen auf der Unterseite befinden.



7. Stecken Sie auf das rechte und linke Ende der Schiene je eine Schraube (M6x75) von unten durch die Haltespangen **[8]**. Ziehen Sie diese handfest an.


8. Nun stecken Sie vier Schrauben (M5x55) ebenfalls von unten in die Schiene ein. Drehen Sie diese ebenfalls nur handfest an.

9. Sind alle Schrauben in die Schiene eingesteckt, können Sie diese nun fest anziehen. Achten Sie bei den vier unteren Schrauben darauf, dass der Kopf vollständig in der Aussparung versenkt wird.

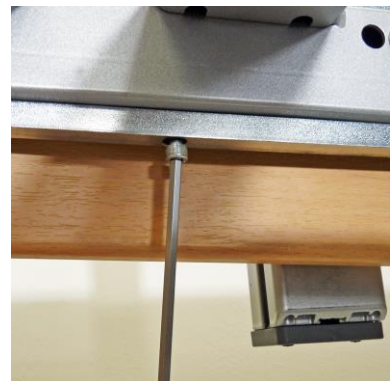

Die Seitensicherungsholme einsetzen


1. Montieren Sie die fußseitige Seitensicherung. Stecken Sie dazu die Seitensicherungsholme **[1]** in die Halterungen am Fußende.

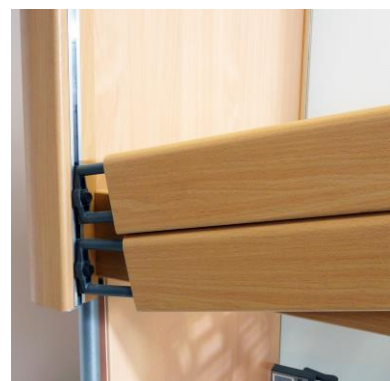


2. Am anderen Ende der Holme stecken Sie nun die Seitensicherungsführungen ein. Achten Sie darauf, dass die Aussparungen nach außen zeigen müssen! Dadurch zeigt die Öffnung der Gummipuffer automatisch nach innen.



3. Betätigen Sie am Parkelement [9] die Auslösung und stecken Sie die Seitensicherung in den entsprechenden Schacht.

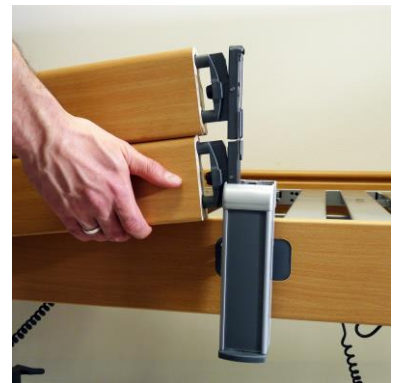

4. Setzen Sie das Unterteil des Schlittens [10] von unten an die Schiene. Drücken Sie die Auslösung und schieben Sie das Schlittenelement hinter das Parkelement [9]. Dabei muss der zweite Schacht freiliegen.


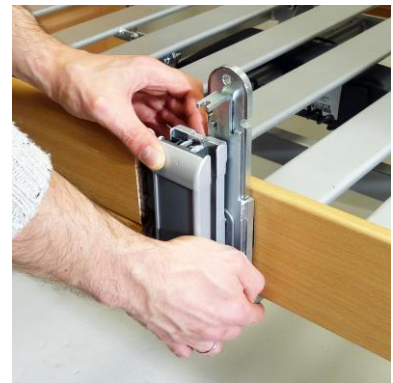


5. Nun montieren Sie die kopfseitige Seitensicherung. Stecken Sie dazu die Seitensicherungsholme [1] in die Halterung am Kopfende. Das andere Ende stecken Sie in den freiliegenden Schacht des Parkelements [9].



Die Mittelstütze montieren


1. Ziehen Sie das untere Schlittenelement **[10]** an die Seite, sodass es frei zugänglich ist. Stecken Sie jetzt das obere Schlittenelement **[11]** von oben auf. Achtung, lassen Sie das untere Schlittenelement nicht los, weil es sonst herunterfällt.
2. Nehmen Sie eine M8-Schraube und setzen Sie diese oben an. Ziehen Sie die Lasche bis zur dahinterliegenden Bohrung hoch und schieben Sie die Schraube durch.
3. Von der anderen Seite setzen Sie nun die richtige Schraube (M8x25) an und schieben diese durch das Loch und durch die Lasche, sodass die vorher eingesteckte Schraube herausfällt.
4. Jetzt setzen Sie die Mittelstütze **[5]** von unten an den Schlitten, sodass die Lasche in die Nut des Mittelpfostens greift. Ziehen Sie die Schraube fest an.

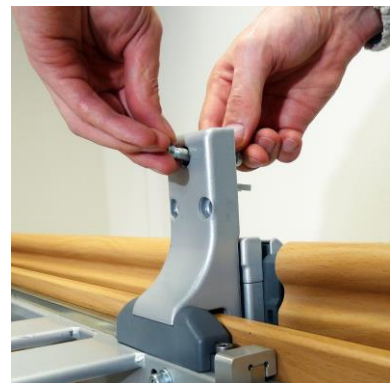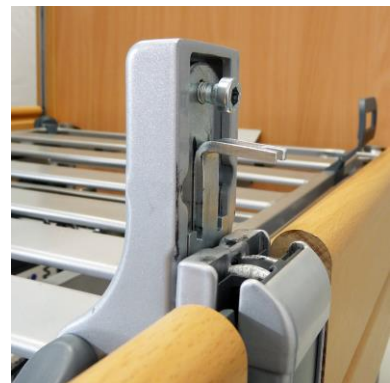


5. Stecken Sie die beiden anderen Schrauben (M8x25) ein und ziehen Sie diese ebenfalls fest an.



6. Testen Sie den Schlitten auf Funktion und die Verschiebbarkeit auf der Schiene.
7. Schieben Sie die Mittelstütze [5] nun auf das Parkelement [9] und sichern Sie ihn durch Herunterdrücken des Auslösegriffs.

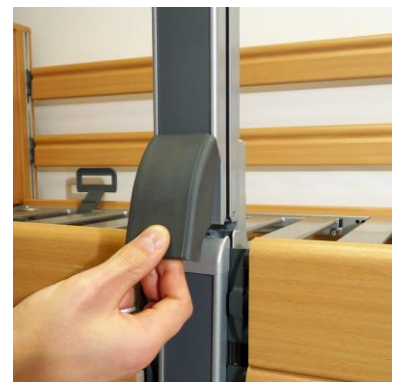

8. Nun müssen die vorher nur handfest angezogenen Schrauben auf der Innenseite fest angezogen werden (M8x35).

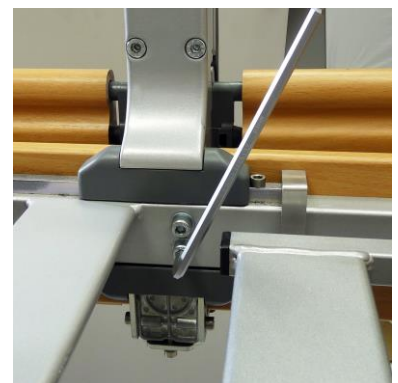

9. Setzen Sie den Knauf [6] auf die Mittelstütze [5]. Der Überhang muss zur Fußseite zeigen.

10. Schrauben Sie den vormontierten Gewindestift ein bis er bündig ist.



Funktionstest

1. Schieben Sie das kopfseitige und die fußseitige Seitensicherung hoch und überprüfen Sie dabei das sichere Einrasten der Holme.



2. Senken Sie die Seitensicherung wieder ab.



3. Verschieben Sie die Mittelstütze **[5]** an verschiedene Positionen und sichern Sie ihn mittels Auslöseknopf.



Justierung

Ist die Betätigung des Auslösegriffs zu schwergängig oder ist die Sicherung unzureichend, ist eine Justierung erforderlich. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

1. Schieben Sie die Mittelstütze **[5]** über das Parkelement **[9]** und sichern Sie ihn mit dem Auslösegriff.
2. An der Unterseite des Schlittens **[10]** lösen Sie die beiden M6-Schrauben rechts und links an den Außenseiten.



3. Mit der Justierschraube (M6) in der Mitte stellen Sie nun die gewünschte Klemmkraft ein.

Drehen Sie die Schraube hinein, erhöht sich die Klemmkraft. Drehen Sie die Schraube heraus, verringert sich die Klemmkraft.

4. Überprüfen Sie mit dem Auslösegriff die Klemmkraft.
5. Nach der Justierung ziehen Sie die beiden seitlichen Fixierschrauben wieder an.




Das Parkelement umbauen

Die Seitenblende [3] und das Parkelement [9] sind für die Montage auf der rechten Seite vormontiert. Um die Seitensicherung auf der linken Seite verwenden zu können, müssen Sie die Seitenblende drehen und das Parkelement umbauen. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

1. Lösen Sie die beiden Schrauben an der Unterseite des Parkelements. Sie sind an der Kunststoffplatte befestigt.
2. Ziehen Sie den Dekorstreifen aus dem Parkelement heraus.



3. Nun lösen Sie die zwei Senkschrauben, die hinter dem Dekorstreifen waren.
4. Jetzt können Sie den Bügel im Parkelement umdrehen.

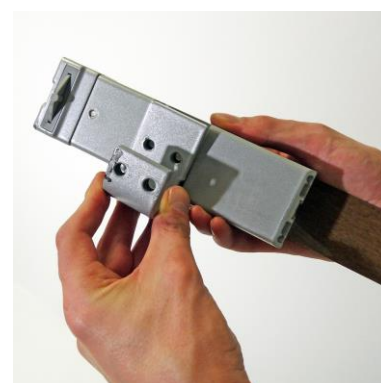

5. Drehen Sie die beiden Senkschrauben wieder in das Parkelement.
6. Schieben Sie den Dekorstreifen wieder ein.
7. Setzen Sie die Kunststoffplatte von unten an und ziehen Sie die beiden Schrauben wieder fest.



Umsetzen der Mittelstütze / Parkelement bei 220cm Liegeflächenlänge

Bei Verwendung des VSG in Verbindung mit einer Bettverlängerung muss das Parkelement um 10 cm zur Bettmitte hin versetzt werden. Die Bauteile sind schon dementsprechend ausgelegt. Lediglich die Seitenblende und die Seitensicherungsholme müssen ausgetauscht werden.

Demontage

1. Mittelstütze demontieren

Gehen Sie dabei in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Montage beschrieben vor.

2. Parkelement demontieren

Gehen Sie dabei in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Montage beschrieben vor.

3. Seitenblende demontieren

Tauschen Sie die Seitenblende der 2m Liegefläche gegen die der 220cm Liegefläche aus. Lösen Sie dazu die Durchgangsschrauben auf der Innenseite des Längsprofils.

Montage

1. Anschlagsschraube umsetzen

Nun versetzen Sie die Anschlagsschraube (M6x8) auf der oberen Schiene [7] um 10 cm.

2. Seitenblende montieren

Montieren Sie die neue Seitenblende wie oben beschrieben. Achten Sie darauf, dass die Seitenblende mit der niedrigen Seite nach oben montiert wird.

3. Parkelement montieren

Montieren Sie das Parkelement wie oben beschrieben.

4. Mittelstütze montieren

Montieren Sie das Mittelstütze wie oben beschrieben und nehmen ggf. eine leichte Einstellung vor.

Herausgegeben von:

Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270
D-32791 Lage / Lippe
Deutschland

Tel: +49 (0) 5232 / 9841-0
Fax: +49 (0) 5232 / 9841-41
E-Mail: info@burmeier.com
www.burmeier.com

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger
schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Inovia-VSG_v1_239699_DE.doc